

ANBIO Corona Antigen Nasentupfer


Durchführung des Tests

Vorbereitung:

- gründlich Hände waschen
- Raumtemperatur
- freie Fläche zum Ablegen der Testmaterialien reinigen
- mehrmals Nase schnäuzen


Schritt 1:

- Tupfer vorsichtig etwas 2,5 cm in Nasenloch einführen
- Tupfer 5 Mal entlang der Schleimhaut im Nasenloch drehen
- Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen

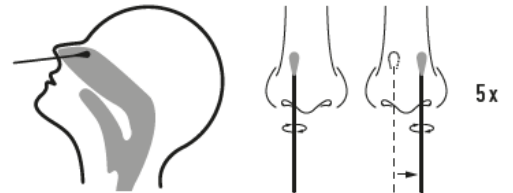


Schritt 2:

- Tupfer mit der entnommenen Probe sofort in das R6hrchen mit der Extraktionsflüssigkeit stellen
- Tupfer etwa 10 Sekunden lang (10 - 15 Mal) in dem R6hrchen drehen, dabei Tupferkopf fest gegen die Innenwand des R6hrchens drücken
- Kappe auf das R6hrchen schrauben

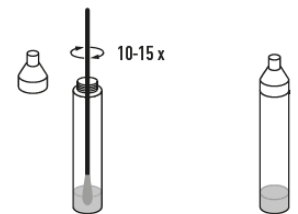

Schritt 3:

- Testkassette aus der Verpackung entnehmen
- oberen Deckel der Kappe 6ffnen
- 2 Tropfen der Extraktionsl6sung in die Probenvertiefung „S“ der Testkassette geben
- 15 - 20 Minuten warten
- Testergebnis ablesen

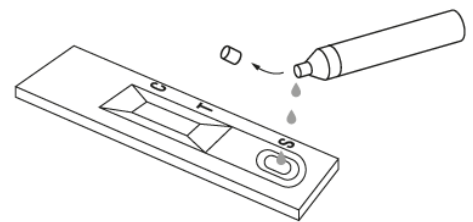

AbleSEN der Ergebnisse:




Negativ

Linie C ist sichtbar



Positiv

Linien C und T sind gef6rbt (auch bei nur leichter F6rbung der Linie T)

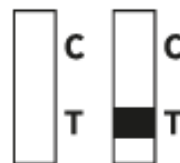

Ung6ltig

keine oder nur Linie T sind sichtbar